



# ColdSPOT

Chladivý polštářek pro omezení krvácení,  
bolestivosti, vzniku modřin a zánětu


MĚKKÉ TKÁŇĚ



NEMRZNOUCÍ  
GELOVÉ JÁDRO



STERILNÍ  
GÁZA

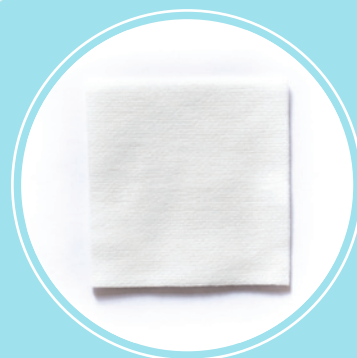

- Diskrétně omezuje nepohodlí pacienta před či po biopsii
- Snadno se přizpůsobí požadovanému tvaru díky své gelové náplni a tenkému tvaru, a zajišťuje tak účinnou léčbu chladem
- Zůstává chladný třikrát déle než současné produkty a působí tak proti krvácení, modřinám, bolesti a zánětu

**KÓD 500**



## Návod k použití

1. Před použitím nechte ColdSPOT minimálně 2 hodiny v mrazničce.
2. Vyměňte ColdSPOT a sterilní gázu z balení.
3. Položte gázu na místo biopsie nebo aspirace.
4. V případě potřeby odstraňte lepící štítky po stranách ColdSPOTu.
5. Umístěte ColdSPOT do středu odběrového místa, aplikujte na kůži.
6. ColdSPOT může být znovu použit jednoduchým zamrazením na další 2 hodiny.

- Pacient může polštářek znovu nachladit a léčbu chladem prodloužit
- Samolepící upevňující chlopně obsahují hypoalergenní lepidlo a lze je připevnit také k vnitřní straně oděvu
- Každý polštářek se dodává se sterilní gázou

## OBJEDNACÍ KÓDY

Kód	Specifikace	Rozměry (mm)	Balení (ks)
500	Fialový	145 × 114	10